

Lista de verificación para la instalación de los equipos dentales A-dec 300/400/500

Para obtener información más detallada, consulte las guías de instalación para el sillón dental y los módulos opcionales.

Modelo	S/N	Modelo	S/N
Sillón dental:		Lámpara dental:	
Sistema dispensador:		Instrumental del asistente:	
Centro de soporte:		Otro:	

Sillón dental

- “ Verifique el rango de movimiento dentro del consultorio. De ser necesario, ajuste la altura máxima de la silla para evitar colisiones.
- El sillón dental está fijo de forma segura al piso.
- El sillón funciona correctamente, incluidas las funciones de elevación, inclinación y programables controladas por los paneles táctiles y el pedal de pie.
- Verifique que el interruptor de parada se active correctamente.
- El apoyacabezas funciona correctamente.

Sistema dispensador

- Las piezas de mano funcionan correctamente y están configuradas de acuerdo con las preferencias del médico:
 - Refrigerante de agua, refrigerante de aire y atomizador.
 - Purga de la manguera de la pieza de mano.
 - Interruptores y válvulas del soporte de la pieza de mano.
 - Presión del aire de accionamiento de la pieza de mano.
- Si está equipado: el brazo flexible asistido por muelles está compensado correctamente.
- El freno de aire del brazo flexible funciona correctamente.
- Solo para 336: el pasador de detención de la rotación está instalado y funciona correctamente.
- Solo para 336: la altura del brazo de ajuste manual y la tensión de rotación están configuradas.
- La unidad de trabajo está nivelada. **Solo para sistemas dispensadores 300:** coloque un nivel sobre la bandeja para esta medición.
- Los brazos articulados no se desvían.
- El control de pie funciona correctamente.

Lámpara dental

- Todos los ajustes de la lámpara y los controles funcionan correctamente.
- La tensión del cabezal y del brazo flexible de la lámpara dental está correctamente ajustada.

Instrumental del asistente, escupidera y llenado del vaso

- El vaciado/la succión están establecidos según las siguientes especificaciones:
 - Succión húmeda:** 34 ± 7 kPa (25,4 cm [10 pulg.] de Hg \pm 5,08 cm [2 pulg.] de Hg), 255 sl/mín. (9 scfm) como mínimo.
 - Succión seca o semisecca:** $16 \pm 3,5$ kPa (11,43 cm [4,5 pulg.] de Hg \pm 2,54 cm [1 pulg.] de Hg), 340 sl/mín. (12 scfm) como mínimo.
- Los botones de la jeringa de agua y aire funcionan sin problemas.
- Las válvulas de la evacuación de alto volumen (HVE) y del eyector de saliva se mueven sin restricciones.
- La temporización del llenado del vaso está configurada correctamente.
- El patrón de flujo de la escupidera enjuaga eficazmente el tazón y lo desagota correctamente.
- Solo para 361, 362 y 363: El extremo del conducto de ventilación de la escupidera está 13 mm (1/2") por encima del marco del centro de soporte.
- Solo 361 y 363: Hay 29 mm (1 1/8") de espacio entre la escupidera y el apoyabrazos.

Servicios

- La presión de aire regulada al sistema dispensador está en 552 kPa (80 psi) .
- La presión de aire regulada al módulo avanzado de control de aire requiere 586 kPa (85 psi).
- La caja de conexiones no presenta pérdidas de aire ni de agua.
- El desagüe gravitatorio funciona correctamente.
- Los conductos y las conexiones no presentan deformaciones ni pérdidas de aire y agua.
- El exceso de conductos y de cables está enrollado y se guarda lejos de las piezas móviles.

Médico/Clinica:

Dirección:

Teléfono:

**Fecha de
instalación:**

**Concesionario/
Sucursal:**

Instalador:

Operatorio:

Notas:

Revisado con el médico/cliente:

Firma

Fecha

Médico/cliente no disponible para revisar la lista de verificación



Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132, EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
www.a-dec.com

A-dec Inc. no ofrece ningún tipo de garantía con respecto al contenido de este documento que incluye, entre otros aspectos, garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.

a dec[®]
reliablecreativesolutions[®]



86.0248.27 Rev D
Fecha de emisión 2020-03-31
Copyright 2020 A-dec Inc.
Todos los derechos reservados.
IGgrphpor18